


Gebrauchsanweisung für Secosol® Maßeinlagen / Schuhrichtungen für PSA-Schuhe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

heute haben Sie die speziell für Sie angefertigten und geprüften Einlagen / Schuhrichtungen für PSA Schuhe erhalten. Damit Sie beschwerdefrei gehen können, beachten Sie bitte folgende Gebrauchs- und Pflegehinweise:

1. Tragen Sie die Einlagen immer in Verbindung mit Socken. Laufen Sie Ihre Einlagen / zugerichteten Schuhe in den nächsten 8-10 Tagen vorerst nur stundenweise ein und steigern Sie die Tragedauer von Tag zu Tag. Benutzen Sie die Maßeinlagen nur in den damit geprüften Sicherheitsschuhen.
2. Nehmen Sie die Einlagen zum Lüften regelmäßig aus den Schuhen. Zum Reinigen genügt das Abreiben mit einem feuchten Tuch. Behandeln Sie Verschmutzungen an zugerichteten Sicherheitsschuhen nicht mit scharfen Reinigungsmitteln. Trocknen Sie feucht gewordene Einlagen und Schuhe bitte nie an der Heizung oder anderen Wärmequellen.
3. Sicherheitsschuhe mit verändertem Sohlenaufbau dürfen nur in Temperaturbereichen bis zu 60° Celsius eingesetzt werden.
4. Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der Verordnung über Persönliche Schutzausrüstung (PSA) EU 2016/425 und entspricht den Anforderungen des Anhangs I der EG Richtlinien 93/42/EWG. Es ist ausschließlich von demjenigen zu benutzen, für den es angefertigt wurde.
5. Die Prüfung über die Veränderung der Sicherheitsschuhe wurde durchgeführt von einer notifizierten Prüfstelle. Die mit dem orthopädischen Einlagensystem Secosol® zertifizierten Modelle finden Sie im Schuhfinder auf www.einlagenportal.com
6. Der Inverkehrbringer kennzeichnet die Einlagen entsprechend der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR).

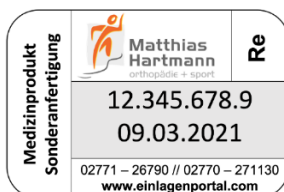

beispielhafte Darstellung

7. Die sich an den Schuhen befindliche Kennzeichnung gibt Hinweise auf:
 - Hersteller und CE Kennzeichnung
 - Typenbezeichnung, Artikelnummer, Größenangabe
 - Symbol für Schutzfunktion, Herstellungsdatum
 - Die angewandte Norm

Für weitere Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten Sie bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung des Schuhherstellers.

QMF-Nr.: 8.6-2/1